

# **АЛЬВОЖИЛ, ПАСТА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ**

## **ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

### **СКЛАД**

Пенгхавар джамбі, евгенол, натрію лаурилсульфат, кальцію карбонат, м'ятний ароматизатор, допоміжні речовини.

### **ВЛАСТИВОСТІ**

АЛЬВОЖИЛ - це паста для накладання хірургічних альвеолярних пов'язок після екстракції зубів, що містить волокна рослини пенгхавар. Паста сприяє гемостазу завдяки компресії та захищає від суперінфекції (альвеолярного остейту), створюючи бар'єрний ефект.

Введений у постекстракційну лунку, АЛЬВОЖИЛ легко прилипає до альвеол завдяки волокнистій консистенції. За допомогою рухів язика пацієнта він поступово самоелімінується без втручання лікаря в міру нормального загоєння рани.

АЛЬВОЖИЛ дуже легко накладається, не потребуючи особливої уваги лікаря, окрім спостереження за процесом загоєння.

### **ПОКАЗАННЯ**

АЛЬВОЖИЛ - це паста, що використовується як пов'язка у випадках сухості постекстракційної лунки або як постекстракційна пов'язка після ускладненого чи травматичного видалення зубів у пацієнтів із сухістю постекстракційної лунки в анамнезі.

### **ПРОТИПОКАЗАННЯ**

АЛЬВОЖИЛ не можна застосовувати в пацієнтів із алергією на один із компонентів в анамнезі та на молочних зубах (у дітей віком до 12 років). Рутинне застосування цього препарату як постекстракційної пов'язки протипоказане.

### **ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ**

Візьміть невелику кульку (близько 0,20 г) пасти і обережно помістіть в підготовлену постекстракційну лунку.  
Не зашивайте.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ**

Пацієнта необхідно попередити про те, що не можна енергійно полоскати ротову порожнину протягом 24 годин після авульсії.  
Не лікуйте більш як 5 зубів за один сеанс.

Увага!

Препарат містить евгенол та м'ятний ароматизатор ((S)-p-мента-1,8-дієн), що можуть спричиняти серйозне подразнення очей.

Може спричиняти шкірні алергічні реакції.

Шкідливий для водної флори і фауни з тривалими ефектами.

Див. основну інформацію з безпечності. '

Одразу після використання банку обов'язково слід закрити кришкою.

### **ФОРМА ВИПУСКУ**

Банка, що містить 10 г пасти.

Тільки для професійного використання в стоматології

## ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ УКАЗАНИХ НА МАРКУВАННІ:



Виробник



Ознайомлення з інструкціями  
для застосування



Дата виготовлення



Номер партії



Використати до



Верхня температурна межа



Знак відповідності технічним  
регламентам з номером органу,  
що був залучений (ТОВ «УНІ-  
СЕРТ)



**СЕПТОДОНТ**

58, Рю дю Пон де Кретей 94107 Сент-Мор-де-Фоссе – Франція

**SEPTODONT**

58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-fossés Cedex - France



UA.TR.116