

VOCO

Bifluorid 10 ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

Фторидовмісний лак для лікування гіперчутливості зубів

Опис матеріалу:

Bifluorid 10 являє собою швидкосохнучу стоматологічну суспензію з гарною адгезією до сухої емалі та дентину. Завдяки цьому можлива хороша герметичність дентинних каналців на тривалий термін.

Bifluorid 10 утворює водостійку ізолюючу плівку, що захищає від термічних та хімічних впливів.

1 г Bifluorid 10 містить:

50 мг фториду натрію (відповідає 23 мг фториду) та

50 мг фториду кальцію (відповідає 24 мг фториду)

Показання до застосування:

Лікування всіх видів чутливості (гіперсенсibiliзація дентину), напр.

- у шийки зуба та краю коронки
- після професійного чищення зубів та видалення зубного каменю
- після препарування та пришліфування поверхні зуба
- при стертих жувальних поверхнях та за наявності кламерів;
- після пошкоджень зубної емалі (злами, сколи)
- герметизація країв порожнин після постановки пломби, особливо після застосування техніки травлення
- як захист дентину / прокладки під амальгамні пломби

Протипоказання:

Bifluorid 10 містить евгенол. Слід відмовитися від застосування Bifluorid 10 за наявності гіперчутливості (алергії) до цих компонентів.

Цільова група пацієнтів:

Bifluorid 10 дозволений до застосування у всіх пацієнтів без обмежень по статі та віком.

Характеристики матеріалу:

Характеристики матеріалу відповідають вимогам, що висуваються до виробам даного цільового призначення, а також вимогам стандартів, що поширюються на цей виріб.

Користувач:

Bifluorid 10 повинен використовуватися професійно підготовленим у галузі стоматології фахівцем.

Застосування:

1. Підготовка

Поверхні, що вимагають лікування, очистити та ґрунтовно просушити повітрям.

2. Забір

а) флакон

Струшувати Bifluorid 10 перед кожним використанням. Тверді частинки повинні бути рівномірно розподілені у суспензії. Достатній об'єм флакона і дві металеві кульки полегшують струшування.

Нанести Bifluorid 10 по краплях на аплікатор, а краще на поролонові тампончики. Флакони з Bifluorid 10 після застосування знову щільно закрити.

б) SingleDose (Унідоза)

Відокремити SingleDose (Унідозу) по лінії перфорації та повернути вгору сторона з надрукованим текстом. За допомогою Single Tim проткнути фольгу, розширити отвір і круговим рухом змочити пензлик рідиною.

3. Аплікація

Поверхню гасити тонким шаром. Увага! Занадто товстий шар легко знімається. Дати фторлаку вбратися протягом 10 - 20 с просушити повітрям. При правильному нанесенні та регулярній гігієні

порожнини рота (не чистити зуби протягом 12 – 24 годин після нанесення) Bifluorid 10 залишається на покритих поверхнях протягом кількох днів. За наявності гіперчутливих шийок зубів, країв коронок або

аналогічних показань процедуру повторити двічі-тричі з інтервалом у 7 днів. При цьому поверхню лише сушити і знову тушувати.

Вказівки, запобіжні заходи:

– Для осіб, у яких відсутній контроль ковтального рефлексу (діти дошкільного віку, інваліди), застосовувати Bifluorid 10 з особливою обережністю.

– Після нанесення Bifluorid 10 призупинити на кілька днів систематичний додатковий прийом фторидів (таблетки фториду або фторована харчова сіль).

– При неправильному застосуванні (див. розділ «Застосування») у ротовій порожнині може утворитися надлишок фторидів. Проковтування великої кількості може викликати нудоту, блювання, пронос. Регулярне перевищення щоденної норми споживання фториду (системно та місцево) більше 2 мг у період розвитку зубів може призвести до порушення мінералізації зубної емалі. Це порушення, позначене як дентальний флюороз, що характеризується появою плям на зубній емалі.

– Bifluorid 10 повинен бути рідким, так щоб після струшування матеріал вільно випливав із кришки-крапельниці.

– Розчинник використовуватиме очищення інструментів тощо.

– Наші вказівки та/або рекомендації не звільняють Вас від перевірки препаратів, що поставляються нами, на їх придатність до використання в відповідних цілях.

Зберігання:

Зберігати Bifluorid 10 у захищеному від прямого сонячного проміння місці при температурі 4 °C - 23 °C. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація:

Матеріал необхідно утилізувати відповідно до місцевих офіційних розпорядженнями.

Обов'язкове повідомлення:

Про всі серйозні побічні події, такі як смерть, серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта користувача або інших осіб у протягом тривалого або короткого періоду часу, а також про серйозну

загрози громадському здоров'ю, які сталися чи могли б статися у зв'язку із застосуванням Bifluorid 10, слід повідомляти компанію VOCO GmbH та до компетентних органів.