

3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Лак **3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish** – це фторвмісний лак для нанесення на емаль і дентин із метою обробки гіперчутливих зубів. Лак Clinpro White Varnish активується вологою та слиною. Він розподіляється по поверхні вологих зубів та фіксується на ній.

Лак **Clinpro White Varnish** – це спиртовий розчин модифікованих смол. Лак має солодкий смак завдяки додаванню ксилітолу.

Лак **Clinpro White Varnish** містить інноваційний компонент – трикальційфосфат (TCP), що використовується виключно компанією 3M ESPE. Іони кальцію та фосфат-іони – це природні компоненти слини. Вони тісно пов'язані зі збереженням здоров'я зубів.

Лак зі смаком м'яти постачається в однодозових упаковках на 0,50 мл Clinpro White Varnish. Кожні 0,50 мл білого лаку **Clinpro White Varnish** містять 25 мг фториду натрію, що еквівалентно 11,3 мг фторид-іона.

ПОКАЗАННЯ

Для використання зі фторвмісними покриттями для:

- обробки гіперчутливих зубів;
- обробки оголеного дентину та чутливої поверхні кореня.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Виразковий гінгівіт і стоматит

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ для пацієнтів

Щоб знизити міру проковтування лаку, підберіть правильне дозування для пацієнта. Упродовж 24 годин після нанесення білого лаку Clinpro White Varnish пацієнт не повинен приймати жодного фторвмісного препарату (наприклад гелів, засобів для полоскання ротової порожнини). Діти, які приймають фторвмісні вітаміни, мають припинити їх прийом на 2–3 дня після лікування.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ для персоналу стоматологічних клінік

Паспорт безпеки матеріалу 3M ESPE можна знайти за адресою www.3MESPE.com. Щоб отримати його, ви також можете зв'язатись із місцевим представництвом компанії.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Цей продукт продається як вогнебезпечний матеріал. Після фіксації на зубах він втрачає свої горючі властивості.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Загальна інструкція з нанесення.

1. Поверхні зубів, які планується обробити, слід почистити хоча б на рівні звичайної чистки зубною щіткою. Ніяких профілактичних заходів не потрібно.

2. Відкрийте упаковку білого лаку Clinpro White Varnish з однією дозою та вичавіть весь вміст на круглий дозувальний шаблон на звороті пакета з фольги або на одну з наклейок із дозувальним шаблоном, що знаходяться в коробці.

3. **ВАЖЛИВО!** Аплікатором-пензликом ретельно перемішайте білий лак Clinpro White Varnish, оскільки компоненти лаків, що містять фторид натрію, можуть розшаровуватися під час зберігання. Перемішуючи, рівномірно розподіляйте матеріал у межах внутрішнього кола шаблону.

4. Щоб обробити повний квадрант у стандартний спосіб під час повторних візитів, достатньо одного-двох узятих на пензлик об'ємів лаку Clinpro White Varnish. Для ретельнішої обробки див. максимальні об'єми, що наведено в рекомендаціях з використання нижче.

5. Користуючись дозувальним шаблоном, наносьте матеріал на верхню частину кола до лінії, що позначає максимальну кількість. Рекомендації щодо максимальних об'ємів. Дозування 0,25 мл (наносьте матеріал на верхню частину внутрішнього кола до лінії, що позначає 0,25 мл)

* Використовувати лише для лікування пацієнтів із молочними зубами.

* Використовувати для лікування всіх пацієнтів, яким потрібно вкрити невелику поверхню зубів. Дозування 0,40 мл (наносьте матеріал на верхню частину внутрішнього кола до лінії, що позначає 0,40 мл)

* Використовувати для лікування пацієнтів як із молочними зубами, так і постійними, яким потрібно вкрити велику поверхню зубів.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ це дозування для лікування пацієнтів, у яких є лише молочні зуби. Виконуйте наведені вище рекомендації. Дозування 0,50 мл (наносьте матеріал на верхню частину внутрішнього кола до лінії, що позначає 0,50 мл)

* Використовувати для лікування пацієнтів із постійними зубами, яким потрібно вкрити велику поверхню зубів.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ це дозування для лікування пацієнтів, у яких є лише молочні зуби. Виконуйте наведені вище рекомендації.

ПРИМІТКА. Якщо планується використання дози повністю (0,50 мл), лак Clinpro White Varnish можна не вичавлювати на дозувальний шаблон. У такому разі можна скористатись блокнотом для змішування або іншою поверхнею.

6. Лак Clinpro White Varnish зафіксується на зубах у присутності слини. Перед нанесенням лаку доцільно видаляти надлишки слини з поверхонь зубів за допомогою промокального папера. Щоб уникнути передчасної полімеризації лаку на пензлику, не слід проводити ним по слині, що накопилась. Рівномірно нанесіть лак Clinpro White Varnish тонким шаром на потрібні поверхні. У разі обробки великих поверхонь наносьте лак Clinpro White Varnish широкими (на декілька зубів) горизонтальними рухами пензликом.

7. Після нанесення пацієнт має закрити рот, щоби лак Clinpro White Varnish застиг. Не рекомендується полоскати рот або відсмоктувати слину одразу ж після нанесення. Ви побачите на зубах тоненьку плівку. Пацієнт може відчутти тонку плівку, якщо проведе язиком по обробленій ділянці.

8. Час лікування лаком Clinpro White Varnish має бути не менше за 4 години. Бажано, щоб воно складало всю ніч.

9. Рекомендуйте пацієнту під час лікування уникати твердої та в'язкої їжі, спиртовмісних продуктів (напоїв, засобів для полоскання ротової порожнини тощо), гарячих напоїв, утриматись від чищення зубів та використання зубних ниток. 10. Після лікувального періоду пацієнт може самостійно видалити лак Clinpro

White Varnish. Для цього він має почистити зуби щіткою чи ниткою або зачекати, поки плівка не відійде сама (зазвичай це трапляється впродовж 24 годин).

ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ Цей продукт розраховано на зберігання та використання за кімнатної температури. Термін зберігання за кімнатної температури складає 24 місяців. Якщо температура оточуючого середовища часто перевищує 27°C/80°F або падає нижче 10°C/50°F, термін зберігання може скоротитись. Кінцеву дату використання див. на зовнішній упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ Інформація щодо утилізації знаходиться в паспорті безпеки матеріалів (його можна знайти на веб-сайті www.3MESPE.com або в місцевому представництві).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦЯ Забороняється надавати інформацію, що відрізняється від даних, які містяться в поданій інструкції. **ГАРАНТІЯ** Компанія 3M ESPE гарантує відсутність у цьому препараті дефектів матеріалу чи виробництва. **КОМПАНІЯ 3M ESPE НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА, БУДЬ-ЯКИХ ДОМИСЛЮВАНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЩОДО ТОВАРНОГО СТАНУ ВИРОБІВ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ АБО ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ ПОКУПЦЯ.** Користувач несе повну відповідальність за придатність цього продукту для власних певних цілей. У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного періоду його усунення й відповідальність компанії 3M ESPE обмежуються ремонтом і заміною цього виробу 3M ESPE.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ За винятком ситуацій, прямо передбачених законодавством, компанія 3M ESPE не несе відповідальності за будь-які збитки та шкоду, спричинені використанням цього виробу: прями, посередні, навмисні, випадкові або опосередковані збитки, незалежно від висунутих пояснень, зокрема гарантій, контрактів, необережного ставлення чи об'єктивної відповідальності.