



Інструкція

Фініри Enhance® (диски, чашки та конуси) – зафіксовані на тримачі, одноразові, імпрегновані оксидом алюмінію, полімеризовані фініри з уретандиметакрилатної смоли, призначені для підготовки поверхні композитної реставрації до остаточного полірування. При правильному використанні, після застосування даної системи, поверхня композитів і компомерів стане гладкою, з передполіровковим блиском. Для оптимальних результатів полірування, після фінірів Enhance®, слід застосовувати полірувальну систему, наприклад, систему для полірування PoGo®, полірувальні пасти для композитів Prisma®•Gloss™.

Увага: дозволено продаж цього продукту тільки стоматологам або на їх замовлення.

СКЛАД

Полімеризований уретан димета-крилат
Оксид алюмінію
Діоксид кремнію

ПОКАЗИ

Фінішні диски, чашки та конуси Enhance® показані для контурування та надання остаточних форм композитним і компомерним реставраціям.

ПРОТИПОКАЗИ

1. Не використовувати повторно. Фінірувальні диски, чашки та конуси Enhance® призначені для одноразового використання. Спроби простерилізувати деталі негативно позначаться на їх характеристиках.

2.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Фінішні диски, чашки та конуси Enhance® призначені для використання без води. Як і при роботі з будь-яким іншим обертальним інструментом, при тривалому контакті відбувається нагрівання. Використовуйте на звичайних оборотах з легкими переривчастим тиском. Застосування додаткового повітряного потоку в процесі шліфування і полірування, посприє видаленню надлишків матеріалу.

2. Використання фінішних дисків, чашок і конусів Enhance® на високих оборотах та/або з надмірним латеральним тиском може бути причиною відриву фініру від стержня, з подальшою аспірацією, ковтанням або причиною травми м'яких тканин.

3. Аспірація: зверніться за медичною допомогою.

4. Проковтування: Не проковтувати. Якщо виникло випадкове проковтування випийте велику кількість води. Якщо з'явилася нудота чи погіршення стану - зверніться за медичною допомогою.

5. Очі, шкірні покриви, слизова оболонка порожнини рота: Ретельно промийте уражену область водою і зверніться за відповідною медичною допомогою.

6. Робота з інструментом, що обертається вимагає особливої обережності і контролю для запобігання травм пацієнта. Контакт з м'якими тканинами (шкіра, ясна, слизова оболонка) може спричинити їх пошкодження. Якщо контакт відбувся, ретельно промийте уражену область водою і зверніться за відповідною медичною допомогою.

7. При використанні фінірувальних дисків, чашок і конусів Enhance®, лікар і пацієнт повинні перебувати в захисних окулярах.

8. Фінірувальні диски, чашки та конуси Enhance® не слід використовувати у пацієнтів, які мають в анамнезі важкі алергічні

реакції на будь-який із компонентів. Якщо з'явилася почервоніння шкіри, подразнення, сенсibiliзація або інші алергічні реакції, негайно зверніться за медичною допомогою.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Цей продукт призначений для використання виключно відповідно до наведеної нижче спеціальної Інструкції до застосування. Будь-яке інше, не зазначене в Інструкції до застосування, використання цього продукту є особистим рішенням практикуючого лікаря, відповідальність за яке несе тільки він сам.

2. Використання з надмірним латеральним тиском може відірвати фінір від тримача (див. Застереження) або викликати пошкодження і знизити ефективність. Такого роду надмірний тиск може подрятати поверхню реставрації.

3. Використовуйте в добре провітрюваному приміщенні. Уникайте вдихання частинок, які переносяться повітряним шляхом.

4. Не допускайте випадкових контактів суміжних реставрацій з диском, що обертається, чашкою або конусом.

5. Деталі з маркуванням «single use» призначені лише для одноразового використання. Утилізуйте після використання. Не використовуйте в інших пацієнтів для уникнення перехресного інфікування.

6. Зберігання: Рекомендується зберігати в сухому стані. Зберігайте фінірувальні диски, чашки і конуси Enhance® при температурі в межах від 10°C до 24°C і при відносній вологості повітря 50% ±20%. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

ПОБІЧНІ ДІЇ

1. Неправильне використання виробу може спричинити пошкодження дихальних шляхів, травного тракту, очей, шкіри або слизових оболонок. (Див.

- Неправильне використання виробу може спричинити надмірне нагрівання. (Див. Проти-показання та Попередження)
- Алергічний контактний дерма-тит та інші алергічні реакції можуть виникати у пацієнтів з підвищеною сенсibiliзацією. (Див. застереження)

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 1: Виконайте реставрацію або вінір за стандартною методикою. Приберіть великі надлишки матеріалу і надайте реставрації остаточну форму за допомогою фінішних борів Prisma®, або алмазними фінішними борами.

КРОК 2: Вставте фінір Enhance® (Диск, чашечку або конус) в кутовий наконечник і продовжуйте шліфування на звичайних оборотах. **УВАГА: ФІНІШНІ ДИСКИ, КОНУСИ ТА ЧАШЕЧКИ ENHANCE® НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ТУРБІННИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ** (наконечниками, що працюють на високих оборотах). Сила впливу фініру Enhance® регулюється шляхом збільшення або зменшення тиску на поверхню композитного матеріалу. Використовуйте помірно або слабке, переривається тиск зі шліфуючими рухами. Найчастіше піднімайте диск, конус або філіжанку від контакту з поверхнею.

КРОК 3: Після отримання остаточних контурів, перейдіть до полірування (наприклад, систему для полірування PoGo®, полірувальні пасти для композитів Prisma®*Gloss™) до досягнення дзеркального блиску поверхні, відповідно до відповідних інструкцій.

ТЕХНІЧНІ ПІДКАЗКИ

- Сила впливу фініру Enhance® регулюється шляхом збільшення або зменшення тиску на поверхню композитного матеріалу. Більший тиск – більше матеріалу знімається; легке тиск залишає гладку поверхню без видалення обсягів матеріалу.
- Перед початком полірування (наприклад, система для полірування PoGo®, полірувальні пасти для композитів Prisma®*Gloss™), реставрації слід надати остаточні

форми. Поверхня має бути гладкою, без вад.

- Фінувальні конуси Enhance® ідеально підходять для оклюзійної поверхні бічних зубів та фісур. Фінірувальні чашки Enhance® добре підходять для пришийкових і апроксимальних поверхонь.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перехресне інфікування



- Не використовуйте повторно продукти, призначені для одноразового застосування. Утилізуйте відповідно до місцевих норм.

НОМЕР ПАРТІЇ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- Не використовувати після сплину терміну придатності. Стандарт ISO:

2.



©2012 DENTSPLY International.



Производитель:
DENTSPLY Caulk
38 West Clarke Ave.
Milford, DE 19963
www.dentsply.com
Tel.: 1-302-422-4511

RN524001 Rev 8-12-12