

Panasil®

Прецизійний відбитковий матеріал, вінілполісилоксан

Опис продукту

Відбиткові матеріали Panasil® – адитивні, еластомерні матеріали з гідрофільними властивостями, високою стійкістю до розриву, точністю передачі розмірів і високою здатністю повертатися в початковий стан (реверсивні властивості). Матеріал Panasil® інішел контакт відрізняється особливо високими початковими гідрофільними властивостями.

Сімейство продуктів Panasil® складається з матеріалів різних ступенів в'язкості (базисна маса, яка розминається, в'язка маса, середньої плинності, текуча маса, дуже текуча). Випускаються у вигляді картриджів 1:1 об'ємом 50 ml (мл) для пістолета-дозатора Аплайфікс 4 виробництва Кеттенбах і у вигляді картриджів 5:1 об'ємом 380 ml (мл) для використання з апаратами для автоматичного дозування і змішування, наприклад, Сімпрес, а також звичайних банок з базисним матеріалом Путті 1:1.

- функціональних відбитків (одноетапної: Panasil® tray трей Софт Хеві)

Panasil® монофаза Медіум застосовується в якості ложкового або відтискного матеріалу, що шприцюється, середньої плинності:

- для виповнення відтисків при виготовленні комбінованих протезів і імплантатів (перенесення відбиткових голівок і первинних деталей)
- для функціональних відбитків
- при виготовленні коронок, мостів і вкладок
- відбитків для знімних протезів
- відбитків при перебазуванні протезів
- для виконання відбитків в техніці подвійного змішування «сендвіч» і двошарових відбитків з використанням плівки
- для техніки з використанням ложок Мульти ложок
- для перенесення корневих штифтів при непрямому відновленні куксів

Panasil® інішел контакт, Panasil® контакт плюс Ікс-лайт і Panasil® контакт два в одному Лайт застосовуються в якості матеріалів, що наносяться з шприца, для:

Сфера застосування

Базисні матеріали Panasil® Путті (Путті, Путті Фаст Сет, Путті Софт) і Panasil® бінетікс Путті (Путті Фаст, Путті Софт) використовуються для виконання першого шару в техніці:

- двошарова техніка (виконується в два етапи)
- техніка «сендвіч» (одномоментна)
- двошарова техніка із застосуванням плівки
- або в якості відтискного матеріалу для виконання функціонального краю

Panasil® трей Фаст Хеві, Panasil® трей Софт Хеві і Panasil® tray трей Софт Хеві Фаст як матеріали з високою в'язкістю використовуються для:

- одноетапної техніки зняття відбитка (одномоментної техніки) з використанням матеріалів одного або двох ступенів в'язкості
- двохетапної техніки зняття відбитка з використанням матеріалів двох ступенів в'язкості (Panasil® трей Фаст Хеві)

- техніки двошарових відбитків (виконуваної в два етапи)
- техніки «сендвіч» (виконуваної за один етап)
- техніки двошарових відбитків з використанням плівки
- техніки подвійного змішування (виконуваної за один етап)
- відбитків при перебазуванні протезів
- відбитків для знімних протезів

Попереджувальні вказівки

Відбиткові матеріали Panasil® не можна використовувати для тимчасового перебазування протезів.

Відбиткові матеріали Panasil® не можна використовувати разом з конденсаційними силіконами, Vinylsiloxanether®, поліефірами або з полісульфідними матеріалами.

Для виконання точних відбитків можна використовувати тільки матеріали Panasil® Путті поодиноці.

Запобіжні заходи

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Не залишати залишки відбиткового матеріалу в борозні або ротовій порожнині.

Не ковтати матеріал! У разі проковтування з необережності: При появі або наявності скарг зверніться до лікаря.

Уникати контакту з очима. При необережному контакті з очима: негайно ретельно промити очі водою або душем для очей. При появі або наявності постійних скарг зверніться до лікаря.

Як правило, ці продукти не викликають алергічних реакцій; однак у особливо чутливих осіб можливе виникнення алергічних реакцій.

Продукти, що використовуються перед виконанням відбитка, що містять активні сполуки сірки, хлориду алюмінію або азоту (ретракційні нитки з сульфатом заліза, відтискний матеріал на основі полісульфідів, латексні рукавички і т.п.), можуть перешкодити реакції затвердіння відтискного матеріалу вінілсілоксанефір. Після застосування цих матеріалів потрібне ретельне очищення таких поверхонь, щоб видалити всі залишки. Уникати контакту з латексними рукавичками.

Ніколи не плутайте кришки банок або ложки для дозування базисної маси і маси-каталізатора при ручному змішуванні.

Для забезпечення оптимального поєднання обох матеріалів при виконанні відбитка в техніці двошарових зліпків обидва етапи повинні бути виконані за часом щільно один до одного.

Відбиткові ложки: підготовка і адгезивні лаки

В цілому можна використовувати всі звичайні відбиткові ложки, якщо забезпечується створення необхідного тиску. Якщо неможливо отримати достатнє зчеплення з відбитковим матеріалом, за допомогою пензлика покрийте відтискну ложку тонким шаром адгезивного лаку Panasil®. Поверхня відбиткової ложки повинна бути багаторазово та повністю покрита таким чином, щоб уся поверхня була візуально синьою. Залиште адгезивний лак висохнути відповідно до інструкції виробника та покрийте достатньою кількістю відтискного матеріалу у відбитковій ложці.

Вказівки щодо застосування: Путті в банках для змішування вручну

Використовувати компоненти тільки з однієї і тієї ж партії.

Не плутати кришки і дозувальні ложки для базисної маси і каталізатора.

За допомогою дозаторних ложок брати відповідно однаковий обсяг базисної маси і каталізатора.

Дозувальні ложки відповідних кольорів треба використовувати виключно для забарвлених в відповідний колір компонентів.

Після застосування ретельно закрийте банки і переконайтеся, що кришки не переплутані.

Якщо необхідно виконати відбиток при наявності великих піддтень і широко відкритих міжзубних ділянок, слід виконати звичайні операції з розблокування.

При використанні індивідуальної ложки звернути увагу на достатню відстань між краєм ложки і зубним рядом/порожниною.

Для виключення виникнення можливих збитків для навколишнього середовища не кидати в каналізацію або водойми.

Уникати контактів з одягом, тому що матеріал неможливо видалити за допомогою хімічної чистки.

Вказівки

Для виконання оптимальних відбитків температура матеріалу перед його застосуванням не повинна істотно відхилитися від 23°C (74°F). В іншому випадку це може позначитися на робочому часі і часі перебування в роті.

Попадання частинок базисної маси в каталізатор або каталізатора в базисну масу призводить до непридатності матеріалу.

Розминайте базисну масу і затвердзувач протягом 45 секунд (seconds), поки матеріал не придбає однорідний колір.

Якщо при роботі з матеріалом використовуються рукавички, то їх попередньо слід протестувати на сумісність. Деякі типи рукавичок можуть перешкоджати полімеризації (наприклад, латексні рукавички) або погіршувати адгезійне зчеплення (наприклад, нітрильні рукавички). Рекомендується використовувати вінілові рукавички.

Перед виконанням коригуючого відбитка первинний відбиток слід промити водою, висушити і відповідним чином вирізати.

Вказівки щодо правильного застосування системи Plug & Press® (Плаг енд Пресс) виробництва Кеттенбах (система картриджів об'ємом 380 ml (мл); 5:1)

Перед першим застосуванням поверніть синю заглушку вліво і вийміть її (рис. 1, стор. 152). Перевірте вихідні отвори. Потім нагвинтіть динамічний змішувач (рис. 2, стор. 152). Зверніть увагу на те, щоб допоміжний елемент для установки був зверху.

Просимо Вас використовувати компоненти тільки нової системи картриджів об'ємом 380 ml (мл) виробництва Кеттенбах, призначеної для дозування і змішування відтискного матеріалу.

Картридж Кеттенбах об'ємом 380 ml (мл) достатньо важкий і при падінні може бути пошкоджений. Пошкоджені картриджі використовувати більше не можна.

При використанні матеріалу з апаратом Сімпрес II активуйте, будь ласка, зазначену на етикетці продукту ступінь швидкості (рис. 6, стор. 153). Недотримання цієї вимоги може призвести до зміни характеристик схоплювання відбиткових матеріалів.

Якщо Ви змішуєте матеріал не за допомогою Сімпрес, а іншого апарату, то дотримуйтесь інструкції для використовуваної Вами системи дозування і змішування.

При кожній зміні апарату слід викидати мінімум 3 cm (см) змішаного матеріалу.

Застосування системи Plug & Press® (Плаг енд Пресс) виробництва Кеттенбах (система картриджів об'ємом 380 ml (мл); 5:1) зі змішувальним апаратом Сімпрес / Сімпрес II

Поршні (при закритій кришці) шляхом натискання на кнопку заднього ходу поршнів автоматично повернути в по-

відтискну ложку (або шприц-аплікатор), натиснувши відповідну клавішу подачі, заповнити необхідною кількістю зліпного матеріалу (рис. 9, стор. 153). Відтискну ложку при цьому слід тримати під кутом і злегка протидіяти матеріалу, який надходить. Під час подачі матеріалу змішувач повинен залишатися в матеріалі, щоб уникнути пухирців повітря.

Відпустити клавішу подачі, як тільки отримано бажану кількість матеріалу. Заповнений динамічний змішувач залишити на картриджі як замок.

Перед наступним використанням використаний змішувач видалити шляхом повороту вліво (рис. 10, стор. 153), візуально проконтролювати випускні отвори на наявність закупорки і накрутити новий динамічний змішувач (рис. 10, стор. 153).

Абсолютно порожній великий картридж видалити з апарату для дозування і змішування і утилізувати відповідно до регіональних і місцевих приписів.

Подальше використання картриджа, який вже був у використанні

На той же змішувальний апарат встановити новий динамічний змішувач та приступити до нової роботи (більше не викидати матеріал).

чаткове положення (рис. 3, стор. 152). Після цього відкрити кришку (рис. 4, стор. 152).

Картридж Кеттенбах об'ємом 380 ml (мл) з попередньо встановленим змішувачем помістити в апарат для дозування і змішування Сімпрес / Сімпрес II (рис. 5, стор. 153). на вже використаному картриджі заповнений змішувач залишається в якості заглушки.

При використанні матеріалу з апаратом Сімпрес II активуйте, будь ласка, зазначену на етикетці продукту ступінь швидкості. Вибір підтверджується світловим сигналом (рис. 6, стор. 153).

Кришку приладу закрити (рис. 7, стор. 153).

Перше використання картриджа

Натиснути кнопку подачі і змішати відтискний матеріал (зверніть увагу на те, щоб динамічний змішувач був нагвинчений на апарат); при цьому перші мінімум 3 cm (см) джгутика матеріалу слід викинути (рис. 8, стор. 153), поки не буде досягнуто однорідне змішування базисної маси і каталізатора (див. колір фінального відтискного матеріалу).

При кожному новому запуску поршнів і при використанні картриджа в різних змішувальних апаратах слід викидати мінімум 3 cm (см) змішаного матеріалу.

Вказівки для застосування картриджів з матеріалом у пістолеті-дозаторі Аплайфікс 4 DS-50 1:1 / 2:1

Картридж вставити в пістолет-дозатор Аплайфікс 4 DS-50 1:1 / 2:1. При цьому звернути увагу на те, щоб насічки на денці картриджа дивилися вниз. Якщо картридж в пістолеті-дозаторі лежить неправильно, хомут ви не закриєте.

Зняти ковпачок з картриджа. Після застосування ковпачок можна надіти знову.

Натиснути на поршні і видавити невелику кількість відтискного матеріалу, поки обидва матеріали не будуть подаватися однаково рівномірно.

Встановити змішувальну канюлю на картридж, замок повернути за годинниковою стрілкою на 90°, поки він не потрапить в паз.

Внести необхідне количество материала непосредственно в оттискную ложку, на предварительный слепок или в шприц для нанесения оттисковых масс. Использовать картридж с установленной смесительной канюлей и насадкой-аппликатором (насадка интраоральная) или шприц для нанесения оттисковых масс для внесения материала вокруг препарированных зубов.

Після застосування знову встановити заглушку. Перед наступним використанням картриджа заглушку або за-

повнену змішувальну канюлю видалити, перевірити вихідні отвори картриджа, щоб переконатися, що отвори не закупорені затверділим матеріалом. Закупорені отвори прочистити і видавити невелику кількість матеріалу, поки обидва матеріали не надходять рівномірно. Встановити нову змішувальну канюлю і продовжувати роботу, як описувалося раніше.

Очищення і дезінфекція Аплайфікс 4

Вийміть картридж.

Видаліть незатверділу пасту серветкою, змоченою в спирті.

Пістолет-дозатор Аплайфікс 4 можна використовувати декілька разів за умови належної дезінфекції. Компанія Кеттенбах рекомендує замінити пістолет-дозатор за наявності ознак зносу. Дезінфекцію можна провести, використовуючи наявний у продажу засіб для дезінфекції методом занурення. Компанія Кеттенбах рекомендує використовувати розчини на основі глутаральдегіду.

Умови зберігання

У сухому місці, захищати від сонячного світла, зберігання при кімнатній температурі, уникаючи екстремальних температур.

Примітка

Деякі матеріали/продукти компанії Кеттенбах доступні для продажу не в усіх країнах.

Тільки для професійного використання в стоматології.

У випадку серйозних інцидентів у зв'язку з використанням виробу негайно зверніться до виробника та компетентного органу.



KETTENBACH GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, Germany
КЕТТЕНБАХ ГмбХ & Ко. КГ,
Ім Геерфелд 7, 35713 Ешенбург, Німеччина

Вироблено у Німеччині

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Кратія Медтехніка»,
вул. Багговутівська, 17-21,
04107, м. Київ, Україна.
Тел.: 0 800 21-52-32

Електронна пошта: ua@cratia.ua



Дезінфекція

Зліпки можна дезінфікувати, наприклад 2%-ним розчином глутаральдегіда або спеціальними розчинами для дезінфекції відбиткових матеріалів. Дотримуйтесь інструкції виробника.

Гальванізація

Відбитки можна покривати сріблом з лужного розчину.

Заливка зліпків

Для виготовлення моделей зліпок можна заливати гіпсом відразу ж після дезінфекції зліпка та протягом декількох тижнів стандартними стоматологічними гіпсами (класу III–V). Зліпки можна заливати гіпсом багаторазово.

Утилізація

Повністю використані картриджі / змішувальні канюлі / насадки-аплікатори та затвердлий матеріал можна утилізувати згідно з місцевими вимогами.

Товарний знак

Panasil® є зареєстрованим товарним знаком компанії Kettenbach GmbH & Co. KG (Кеттенбах ГмбХ & Ко. КГ).









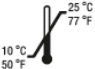



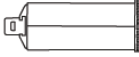
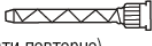


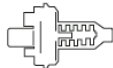




Обмеження відповідальності

За винятком випадків, коли це заборонено законодавством, компанія Kettenbach GmbH & Co. KG (Кеттенбах ГмбХ & Ко. КГ) не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені в зв'язку з використанням даного продукту, будь то прямий, непрямий, особливий, випадковий або супутній збиток, незалежно від правової підстави, у тому числі гарантії, контракту, необережності або повної відповідальності.

Інформація про продукцію компанії Кеттенбах базується на результатах комплексних досліджень та досвіді застосування технології. Ми надаємо ці результати відповідно до нашої достовірної інформації, але залишаємо за собою право на технічні зміни з метою вдосконалення продукції. Проте це не звільняє користувача від обов'язку дотримуватися всіх наших рекомендацій та вказівок під час використання продукту.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 08.2021

Умовні позначення

Відповідність до Директиви про медичні вироби MDR 2017/745	 0123	Знак відповідності		Ознайомлення з інструкцією для застосування	
Медичний виріб		Зберігати в сухому місці		Не допускати впливу сонячного світла	
Код партії		Використати до		Температурне обмеження	
Номер за каталогом		Виробник		Не використовувати повторно	
Картридж ml (мл)		Статична насадка для змішування Картридж 50 ml (мл) (не використовувати повторно)		Адгезив	
Картридж 380 ml (мл)		Динамічний змішувач картриджа 380ml (мл) (не використовувати повторно)		Інтраоральний наконечник (не використовувати повторно)	
Ємність		Мірна ложка		Пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці	
Міліметр	mm (мм)	Мілілітр	ml (мл)	Відпускається тільки за рецептом.	
Менше або дорівнює	≤	Більше або дорівнює	≥		

огляд продукції

Назва виробу	ISO 4823	Консистенція (прибл.) mPa (мм)	Співвідношення компонентів при змішуванні та загальний об'єм на одиницю	Техніка змішування	Змішувальний елемент
Panasil® Путті	Тип 0, Путті	24	1:1, 900 ml (мл) в банках	Ручна, 1 мірна ложка (12,3 ml (мл) кожного компонента (пасти базового матеріалу та пасти каталізатора)	Ручне змішування
Panasil® Путті Фаст	Тип 0, Путті	24	1:1, 900 ml (мл) в банках	Ручна, 1 мірна ложка (12,3 ml (мл) кожного компонента (пасти базового матеріалу та пасти каталізатора)	Ручне змішування
Panasil® Путті Софт	Тип 0, Путті	24	1:1, 900 ml (мл) в банках	Ручна, 1 мірна ложка (12,3 ml (мл) кожного компонента (пасти базового матеріалу та пасти каталізатора)	Ручне змішування
Panasil® бінетікс Путті Фаст	Тип 0, Путті	23	5:1, 380 ml (мл) у картриджі	Сімпрес/Сімпрес II або інший автоматичний пристрій для дозування або змішування	Динамічний змішувач, синій
Panasil® бінетікс Путті Софт	Тип 0, Путті	23	5:1, 380 ml (мл) у картриджі	Сімпрес/Сімпрес II або інший автоматичний пристрій для дозування або змішування	Динамічний змішувач, синій
Panasil® трей Фаст Хеві	Тип 1, в'язка маса	32	5:1, 380 ml (мл) у картриджі	Сімпрес/Сімпрес II або інший автоматичний пристрій для дозування або змішування	Динамічний змішувач, синій
Panasil® трей Фаст Хеві	Тип 1, в'язка маса	34	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Аплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, зелена діаметр 6,5 mm (мм)
Panasil® трей Софт Хеві	Тип 1, в'язка маса	32	5:1, 380 ml (мл) у картриджі	Сімпрес/Сімпрес II або інший автоматичний пристрій для дозування або змішування	Динамічний змішувач, синій
Panasil® трей Софт Хеві	Тип 1, в'язка маса	34	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Аплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, зелена діаметр 6,5 mm (мм)
Panasil® трей Софт Хеві Фаст	Тип 1, в'язка маса	34	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Аплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, зелена діаметр 6,5 mm (мм)

Технічні характеристики

Найменування продукту	Співвідношення при змішуванні	Загальний час роботи при 23°C/74°F ≤	Загальний час роботи при 35°C/95°F ≤	Час перебування у роті при 35°C/95°F ≥	Закінчення схоплювання* ≥	Твердість за Шором (прибл.)	Лінійна зміна розмірів (прибл.) %	Повернення в початковий стан після деформації (прибл.) %	Деформація під тиском (прибл.) %
Panasil® Путті	1:1	2 min (хв)	Не потрібен	2 min (хв)	4 min (хв)	A 66	-0,20	99,0	2,7
Panasil® Путті Фаст	1:1	1 min (хв) 30 s (с)	Не потрібен	2 min (хв)	3 min (хв) 30 s (с)	A 66	-0,20	99,0	2,7
Panasil® Путті Софт	1:1	2 min (хв)	Не потрібен	2 min (хв)	4 min (хв)	A 60	-0,20	99,0	2,7
Panasil® бінетікс Путті Фаст	5:1	1 min (хв) 30 s (с)	Не потрібен	2 min (хв) 30 s (с)	4 min (хв)	A 63	-0,20	99,5	2,5
Panasil® бінетікс Путті Софт	5:1	2 min (хв)	Не потрібен	3 min (хв)	5 хвилин	A 56	-0,20	99,5	3,5
Panasil® трей Фаст Хеві	5:1	1 min (хв) 20 s (с)	Не потрібен	2 min (хв)	3 min (хв) 20 s (с)	A 62	-0,20	99,7	2,5
Panasil® трей Фаст Хеві	1:1	1 min (хв)	Не потрібен	2 min (хв)	3 min (хв)	A 62	-0,20	99,5	3,0
Panasil® трей Софт Хеві	5:1	2 min (хв)	Не потрібен	2 min (хв)	4 min (хв)	A 55	-0,20	99,7	3,0
Panasil® трей Софт Хеві	1:1	2 min (хв)	Не потрібен	2 min (хв)	4 min (хв)	A 55	-0,20	99,5	3,0
Panasil® трей Софт Хеві Фаст	1:1	1 min (хв)	Не потрібен	2 min (хв)	3 min (хв)	A 55	-0,20	99,5	3,0

Технічні характеристики

Найменування продукту	Співвідношення при змішуванні	Загальний час роботи при 23°C/74°F ≤	Загальний час роботи при 35°C/95°F ≤	Час перебування у роті при 35°C/95°F ≥	Закінчення схоплювання* ≥	Твердість за Шором (прибл.)	Лінійна зміна розмірів (прибл.) %	Повернення в початковий стан після деформації (прибл.) %	Деформація під тиском (прибл.) %
Panasil® монофаза Медіум	5:1	2 min (хв)	1 min (хв)	2 min (хв)	4 min (хв)	A 60	-0,20	99,7	3,5
Panasil® монофаза Медіум	1:1	2 min (хв)	1 min (хв)	2 min (хв)	4 min (хв)	A 60	-0,20	99,7	3,5
Panasil® інішел контакт Регулар	1:1	1 min (хв) 30 s (с)	1 min (хв)	2 min (хв) 30 s (с)	4 min (хв)	A 46	-0,20	99,7	3,0
Panasil® інішел контакт Лайт	1:1	1 min (хв) 30 s (с)	1 min (хв)	2 min (хв) 30 s (с)	4 min (хв)	A 46	-0,20	99,3	3,5
Panasil® інішел контакт Лайт Фаст	1:1	1 min (хв)	30 s (с)	2 min (хв)	3 хвилин	A 46	-0,20	99,3	3,5
Panasil® інішел контакт Ікс-лайт	1:1	1 min (хв) 30 s (с)	1 min (хв)	2 min (хв) 30 s (с)	4 min (хв)	A 46	-0,20	99,3	3,5
Panasil® інішел контакт Ікс-лайт Фаст	1:1	1 min (хв)	30 s (с)	2 min (хв)	3 min (хв)	A 46	-0,20	99,3	3,5
Panasil® контакт два в одному Лайт	1:1	2 min (хв)	1 min (хв)	2 min (хв)		A 46	-0,20	99,7	3,5
Panasil® контакт плюс Ікс-лайт	1:1	2 min (хв)	1 min (хв)	2 min (хв)		A 46	-0,20	99,7	5,0

* Загальний час затвердіння (вилучення з ротової порожнини) від початку змішування

огляд продукції

Назва виробу	ISO 4823	Консистенція (прибл.) ттп (мм)	Співвідношення компонентів при змішуванні та загальний об'єм на одиницю	Техніка змішування	Змішувальний елемент
Panasil® монофаза Медіум	Тип 2, середньої текучості	35	5:1, 380 ml (мл) у картриджі	Сімпрес/Сімпрес II або інший автоматичний пристрій для дозування або змішування	Динамічний змішувач, синій
Panasil® монофаза Медіум	Тип 2, середньої текучості	35	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, зелена діаметр 6,5 ттп (мм)
Panasil® інішел контакт Регулар	Тип 2, середньої текучості	37	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, зелена діаметр 6,5 ттп (мм)
Panasil® інішел контакт Лайт	Тип 3, Низька в'язкість	41	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, жовта, діаметр 4,2 ттп (мм)
Panasil® інішел контакт Лайт Фаст	Тип 3, Низька в'язкість	41	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, жовта, діаметр 4,2 ттп (мм)
Panasil® інішел контакт Ікс-лайт	Тип 3, Низька в'язкість	44	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, жовта, діаметр 4,2 ттп (мм)
Panasil® інішел контакт Ікс-лайт Фаст	Тип 3, Низька в'язкість	44	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, жовта, діаметр 4,2 ттп (мм)
Panasil® контакт два в одному Лайт	Тип 3, Низька в'язкість	38	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, зелена діаметр 6,5 ттп (мм)
Panasil® контакт плюс Ікс-лайт	Тип 3, Низька в'язкість	42	1:1, 50 ml (мл) у картриджі	Пістолет-дозатор Апплайфікс 4 DS-50 1:1/2:1	канюля для змішування, жовта, діаметр 4,2 ттп (мм)