

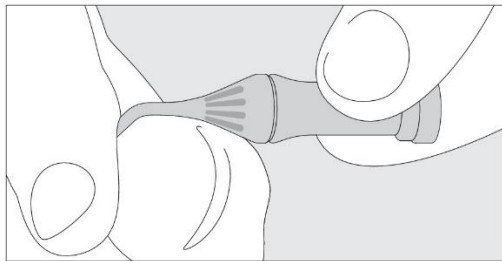
Retraction Paste (Ретракційна паста)

Fig. A

Опис матеріалу

Ретракційна паста – це ретракційний засіб для розширення зубоясенної борозни. Він справляє в'яжучий вплив на ясна.

Показання

Для ретракції краю ясен та забезпечення сухості у борозні, якщо пародонт є здоровим.

Протипоказання

- Не застосовуйте матеріал, якщо є відкрита кістка, пародонтопатія, що прогресує, або відкриті дефекти фуркації.
- Не застосовуйте для лікування пацієнтів, які мають підвищену чутливість до каоліну та хлориду алюмінію.

Основні запобіжні заходи

- Застосовується тільки у галузі стоматології.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте потрапляння в очі! У разі випадкового потрапляння в очі одразу ретельно промийте їх великою кількістю води та, якщо необхідно, проконсультуйтеся з лікарем.
- Не проковтуйте матеріал. У разі випадкового проковтування проконсультуйтеся з лікарем.

Побічні дії

Дотепер побічних дій не виявлено. В окремих випадках не можна виключати ризик виникнення підвищеної чутливості до компонентів матеріалу.

Вказівки щодо застосування

Використовуйте капсулу відразу після відкриття алюмінієвого пакета. Викиньте матеріал, який залишився у капсулі.

Рекомендований спосіб застосування

1. Відпрепаруйте зуб.
2. Помістіть капсулу у відповідний диспенсер.
3. У разі потреби вигніть кінчик капсули у необхідне положення (мал. А).
4. Видавіть невелику кількість пасти та викиньте її.
5. Якщо цього потребує клінічна ситуація, введіть ретракційну нитку в зубоясенну борозну.
6. Промийте борозну водою і просушіть її.
7. Повільно наносіть пасту в зубоясенну борозну навколо підготовленої зони, доки борозну не буде повністю заповнено. У разі потреби використовуйте компресійні ковпачки або інші компресійні засоби.
8. Щоб відбулася ретракція ясен, залиште матеріал не більше ніж на 2 хвилини. Під час висихання пасти зберігайте зону, яку оброблюєте, сухою.

Увага! Якщо матеріал залишити в ротовій порожнині на тривалий час, може виникнути подразнення ясен. Матеріал має знаходитися всередині ротової порожнини не довше встановленого часу висихання.

9. Повністю видаліть матеріал із зубоясенної борозни і ротової порожнини за допомогою повітря, води та аспіратора.

Примітка. Залишки матеріалу можуть призвести до неточностей у відбитку або збільшення часу твердіння відбиткового матеріалу.

10. Просушіть ясна повітрям і перевірте результат ретракції.
11. Якщо потрібна більш виражена ретракція, повторіть процедуру, починаючи з 6-ої дії. У разі потреби додатково скористайтеся тонкою ретракційною ниткою.
12. Створіть відбиток.

Умови зберігання та термін придатності

- Зберігайте за кімнатної температури (15-25 °C/59-77 °F).
- Не застосовуйте після закінчення терміну придатності.
- Використовуйте капсулу одразу після відкриття алюмінієвого пакета. Викиньте матеріал, який залишився у капсулі.

Склад

Каолін, хлорид алюмінію, гексагідрат, вода, барвники, ароматизатор

Форма випуску

25 капсул по 0,37 г пасти	REF 919381
---------------------------	------------



DMG Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмБХ

Елбгауштрассе 248, 22547 Гамбург, Німеччина
тел. +49(0)40 84 006-0, www.dmg-dental.com

